

 Dinkes Kab Karanganyar	PEMERIKSAAN URIN 3 PARAMETER DENGAN STRIP		 UPT Puskesmas Matesih	
	SOP	Nomor		: 440/05.C.SOP.110.01/2019
		Terbit ke		: 2
		No.Revisi		: 1
		Tgl.Terbit		: 2 Januari 2019
	Halaman	: 1 - 2		
Ditetapkan Kepala UPT Puskesmas Matesih		 <u>drg. ENDANG SULASTRI</u> NIP. 197910172010012013		

Pengertian	Pemeriksaan urin 3 parameter terdiri dari pemeriksaan protein urine, reduksi urine, dan pH. pH urin adalah derajat keasaman urin. Protein urine adalah suatu pemeriksaan untuk mengetahui kadar protein dalam urine. Reduksi urine adalah suatu pemeriksaan untuk mengetahui kadar glukosa/gula dalam urine
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeriksaan pH, Protein dan Reduksi Urine.
Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Matesih No. 449.1/70.05/2019 tentang Jenis Jenis Pemeriksaan Laboratorium yang Tersedia.
Referensi	<i>Manual Guide Urinalysis Reagent Strip Urin Verify. 2016</i>
Langkah-langkah/ Prosedur	1. Petugas melakukan cuci tangan lalu memakai APD sebelum melakukan tindakan. 2. Petugas menyiapkan alat dan bahan. 3. Petugas menerima sampel urin. 4. Petugas memasukkan strip urin 3-P selama 1-3 detik dan mengangkatnya, lalu menyamakan warnanya dengan standar warna pada botol strip. 5. Petugas mencatat hasil sesuai perubahan warna yang terjadi pada buku register dan blangko pemeriksaan laboratorium.
Diagram Alir	-
Unit Terkait	Laboratorium, Ruang Pemeriksaan Umum, Ruang Kesehatan Ibu dan KB, Ruang Kesehatan Anak dan Imunisasi, dan Ruang UGD dan Rawat Inap.

Rekaman Historis:

No	Halaman	Yang dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.
1.	1	Ditetapkan Plt UPT Puskesmas Matesih	Kepala UPT Puskesmas Matesih	2 Januari 2019
2.	1	drg. Dwi Rusharyati NIP.197302142000122005	drg. Endang Sulastri NIP.197910172010012013	2 Januari 2019