


	PEMERIKSAAN SYPHILIS		
	SOP	No. Dokumen : SOP/C/15/IX/2023	
		No Revisi : 01	
		Tgl Terbit : 02 /09/2023	
Halaman : 1/2		drg. Ririn Nurliyani BR, M.Kes NIP. 197012262005012007	
UPT Puskesmas Colomadu II			

1. Pengertian	Pemeriksaan sipilis adalah pemeriksaan Laboratorium dengan bahan pemeriksaan berupa darah serum/plasma untuk mendeteksi bakteri Treponema Palidum penyebab sifilis dalam darah dengan metode rapid test
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam melaksanakan Pemeriksaan Sipilis di Puskesmas.
3. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas No 449.1/105.16 Tahun 2023 tentang jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yang Tersedia SK Kepala Puskesmas No.449.1/114.16 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Pedoman Standar Operasional Prosedur(SOP) UPT Puskesmas Colomadu II
4. Referensi	Manual Petunjuk Pemeriksaan Sipilis
5. Prosedur	Alat dan Bahan - Kapas alkohol - Sput - Kapas kering - Serum/Plasma - Siphilis Rapid Test Stript - Torn paper - Diluent siphilis rapid tes - Mikropipet 20 mikroliter - Mikropipet 10 mikroliter
6. Langkah-langkah	- Petugas menyiapkan sipilis rapid tes strip dengan meletakkan pada permukaan datar pada suhu ruang - Petugas menambahkan 20 mikroliter sampel darah/10 mikroliter sampel serum/plasma kedalam lubang sampel pada strip siphilis rapid test - Petugas menambahkan 4 tetes diluents sipilis rapid test kedalam lubang yang telah terisi sampel - Petugas membaca hasil pengujian dalam waktu 5-20 menit dengan interpretasi hasil: Negatif: terbentuk 1 garis berwarna pada zona garis kontrol Positif: terbentuk 2 garis berwarna pada zona garis control dan zona garis test - Petugas melakukan pencatatan hasil pemeriksaan

TERKENDALI

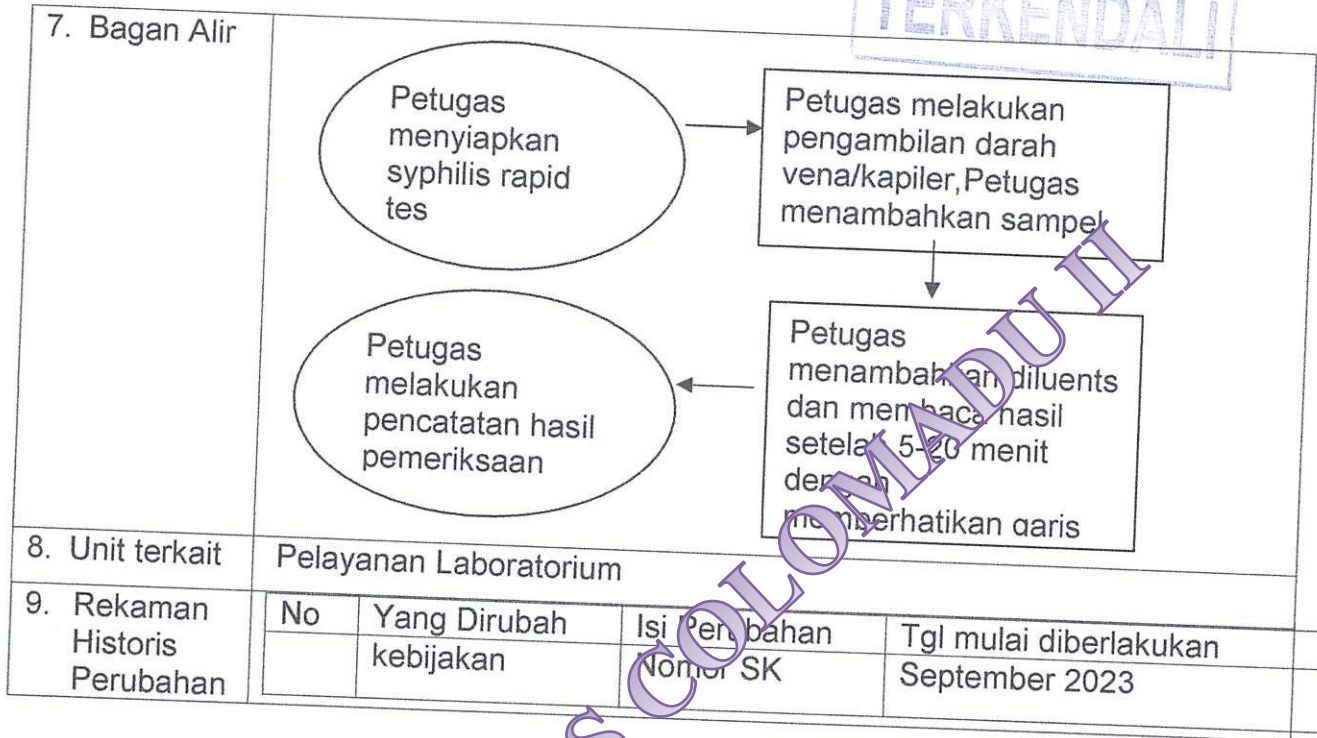

PUSKESMAS COLOMADU III