

 Dinkes Kab Karanganyar	PEMERIKSAAN GULA DARAH DENGAN FOTOMETER		 UPT Puskesmas Matesih	
	SOP	Nomor		: 440/05-C-SOP.121.01/2019
		Terbit ke		: 2
		No.Revisi		: 1
		Tgl.Terbit		: 2 Januari 2019
	Halaman	: 1 - 2		
Ditetapkan Kepala UPT Puskesmas Matesih		 <u>drg. ENDANG SULASTRI</u> NIP. 197910172010012013		

Pengertian	Pemeriksaan gula darah adalah pemeriksaan untuk mengetahui kadar Gula dalam darah, dengan menggunakan fotometer.
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeriksaan gula darah dengan Fotometer.
Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Matesih No. 449.√/70.05/2019 tentang Jenis-jenis Pemeriksaan Laboratorium yang tersedia.
Referensi	Manual Guide Pemeriksaan Gula Darah GOD-PAP. 2016. Elitech Group KMK No. HK.02.02-MENKES-514-2015 ttg Panduan Praktik Klinis Dokter FASYANKES, hal. 1240
Langkah-langkah/ Prosedur	1. Lakukan cuci tangan lalu pakai APD sebelum melakukan tindakan. 2. Siapkan alat yang dipakai dan siapkan reagen pada suhu ruang. 3. Lakukan sampling darah, lalu pisahkan serum/ plasmanya untuk pemeriksaan. 4. Siapkan tiga tabung, tabung I sebagai blanko diisi 1000µl reagen gula darah, tabung II sebagai standar diisi 1000 µl reagen gula darah dan 10 µl standar, tabung III sebagai sampel diisi 1000 µl reagen gula darah dan sampel 10 µl 5. Inkubasi pada suhu ruang selama 10 menit, lalu baca dengan menggunakan Fotometer (lihat SOP Penggunaan Fotometer Microlab) 6. Catat hasil pemeriksaan pada buku register dan blangko pemeriksaan lab.
Diagram Alir	-
Unit Terkait	Laboratorium, Ruang Pemeriksaan Umum, Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut, Ruang Kesehatan Ibu dan KB, Ruang Kesehatan

	Anak dan Imunisasi, dan Ruang UGD dan Rawat Inap.
--	---

Rekaman Historis:

No	Halaman	Yang dirubah	Perubahan	Diberlaku- kan Tgl.
1.	1	Ditetapkan Plt UPT Puskesmas Matesih	Kepala UPT Puskesmas Matesih	2 Januari 2019
2.	1	drg. Dwi Rusharyati NIP.197302142000122005	drg. Endang Sulastri NIP.197910172010012013	2 Januari 2019