

 Dinkes Kab Karanganyar	PEMERIKSAAN GULA DARAH RAPID (EASY TOUCH)		 UPT Puskesmas Matesih	
	SOP	Nomor		: 440.05.C/SOP.118.01/2019
		Terbit ke		: 2
		No.Revisi		: 1
		Tgl.Terbit		: 2 Januari 2019
		Halaman		: 1 - 2
Ditetapkan Kepala UPT Puskesmas Matesih		 <u>drg. ENDANG SULASTRI</u> NIP. 197910172010012013		

Pengertian	Gula darah adalah istilah yang mengacu kepada tingkat glukosa didalam darah. Konsentrasi gula darah diatur dengan ketat didalam tubuh. Glukosa yang dialirkan melalui darah adalah sumber utama energi untuk sel- sel tubuh.
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeriksaang glukosa darah bagi Petugas Laboratorium di Puskesmas Matesih.
Kebijakan	SK Kepala Puskesmas Matesih No. 449.1/70.05/2019 tentang jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yang tersedia.
Referensi	<i>Manual Guide Glucose Easy Touch. 2016</i> KMK No. HK.02.02-MENKES-514-2015 ttg Panduan Praktik Klinis Dokter FASYANKES, hal 1242
Prosedur/ Langkah- Langkah	a. Petugas melakukan cuci tangan lalu memakai APD sebelum melakukan tindakan. b. Petugas menyiapkan alat Easy Touch dan memasukkan strip gula dan memastikan sesuai kode. c. Petugas mengambil darah kapiler pasien dengan lancet steril dan menghapus darah yang pertama kali keluar dengan kapas. d. Petugas menunggu sampai tampak tanda tetes darah. e. Petugas meneteskan darah pada ujung striptest yang sudah disiapkan. f. Petugas menunggu reaksi 10 detik dan membaca hasilnya yang tertera pada alat. Keterangan: Alat ini hanya mampu membaca kadar gula sampai $\pm$ 500 mg/dl. Nilai rujukan: • GDS: sampai 150 mg/dl • GDP :50.-100 mg/dl • GD2JPP :sampai 140 mg/dl
Diagram Alir	-

Unit terkait	Laboratorium, Ruang Pemeriksaan Umum, Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut, Ruang Kesehatan Ibu dan KB, Ruang Kesehatan Anak dan Imunisasi, dan Ruang UGD dan Rawat Inap.
--------------	---

Rekaman Historis:

No	Halaman	Yang dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.
1.	1	Ditetapkan Plt UPT Puskesmas Matesih	Kepala UPT Puskesmas Matesih	2 Januari 2019
2.	1	drg. Dwi Rusharyati NIP.197302142000122005	drg. Endang Sulastri NIP.197910172010012013	2 Januari 2019