

 Dinkes.Kab. Karanganyar	PEMELIHARAAN BULANAN LEMARI ES		 UPT Puskesmas Matesih
	SOP	NO :	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit :	
		Halaman :	
Ditetapkan Kepala UPT Puskesmas Matesih			dr. Y Iwan Christiawan NIP. 196910052002121006

Pengertian	Melakukan pemeliharaan bulanan terhadap lemari es dan tempat penyimpanan vaksin
Tujuan	Menjaga kondisi lemari es sebaik mungkin untuk mencegah kerusakan vaksin
Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Matesih NomorTentang Pelayanan Klinis
Referensi	Permenkes Nomor 42 tahun 2013
Prosedur	1. Petugas memakai APD sesuai level pemakaian APD pada SOP pemakaian APD selama pandemi Covid-19 2. Petugas melakukan penghitungan vaksin yang akan dipindahkan dan kondisikan coolpack vaksin carier sesuai kebutuhan. 3. Petugas memindahkan vaksin ke dalam vaksin carier yang telah diisi coolpack dan letakkan thermometer ke dalamnya. 4. Petugas mencabut steker lemari es. 5. Petugas membuka kran air di bawah lemari es, buang airnya. 6. Petugas melakukan pembersihan lemari es dengan menggunakan lap yang lembut (Kanebo) 7. Petugas memeriksa kerapatan pintu menggunakan selebar kertas, bila kertas sulit ditarik berarti karet pintu masih baik, sebaliknya bila kertas mudah ditarik berarti karet sudah mengeras dan beri bedak. 8. Bila ditemukan baut kendur pada engsel pintu, petugas mengencangkan dengan obeng 9. Petugas mencolokkan kembali steker bila sudah selesai pembersihan 10. Setelah suhu sudah mencapai 2 – 8 °C, petugas menyusun kembali vaksin kedalam lemari es. 11. Petugas mencatat kegiatan pemeliharaan bulanan pada kartu pemeliharaan
Unit Terkait	Cleaning Servis
Dokumen terkait	Kartu Pemeliharaan Bulanan

Rekaman historis perubahan.	No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai diberlakukan.