

 Dinkes Kab Karanganyar	PEMERIKSAAN ASAM URAT DENGAN FOTOMETER		 UPT Puskesmas Matesih	
	SOP	Nomor		: 440/05-L-SOP/128-01/2019
		Terbit ke		: 2
		No.Revisi		: 1
		Tgl.Terbit		: 2 Januari 2019
Ditetapkan Kepala UPT Puskesmas Matesih		 drg. ENDANG SULASTRI NIP. 197910172010012013		

Pengertian	Pemeriksaan kolesterol adalah pemeriksaan untuk mengetahui kolesterol dalam darah dengan menggunakan fotometer. Kolesterol adalah lemak yang terdapat dalam aliran darah atau sel tubuh yang sebenarnya dibutuhkan untuk pembentukan dinding sel dan sebagai bahan baku beberapa hormon.
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah bagi petugas laboratorium untuk pemeriksaan Kolesterol dengan fotometer.
Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Matesih No. 449.1/70.05/2019 tentang Jenis-Jenis Pemeriksaan Laboratorium yang tersedia.
Referensi	Manual Guide Pemeriksaan Asam Urat Mono SL. 2015. ELITech Group. Perancis KMK No. HK.02.02-MENKES-514-2015 ttg Panduan Praktik Klinis Dokter FASYANKES, hal. 1240
Langkah-langkah/ Prosedur	a. Petugas melakukan cuci tangan lalu menggunakan APD sebelum melakukan pemeriksaan. b. Petugas menyiapkan alat Easy Touch dan memasukkan strip test uric acid dan memastikan sesuai kode. c. Petugas mengambil darah kapiler pasien dengan lancet steril dan menghapus darah yang keluar pertama kali dengan kapas. d. Petugas menunggu sampai tampak tanda tetes darah. e. Petugas meneteskan darah pada ujung strip test yang sudah disiapkan. f. Petugas menunggu reaksi 20 detik dan membaca hasilnya yang tertera pada alat.
Diagram Alir	-

Unit Terkait	Laboratorium, Ruang Pemeriksaan Umum, Ruang Kesehatan Ibu dan KB, Ruang Kesehatan Anak dan Imunisasi, dan Ruang UGD dan Rawat Inap.
--------------	---

Rekaman Historis:

No	Halaman	Yang dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.
1.	1	Ditetapkan Plt UPT Puskesmas Matesih	Kepala UPT Puskesmas Matesih	2 Januari 2019
2.	1	drg. Dwi Rusharyati NIP.197302142000122005	drg. Endang Sulastri NIP.197910172010012013	2 Januari 2019