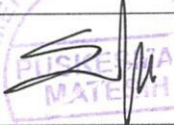


 Dinkes Kab Karanganyar	PEMERIKSAAN ASAM URAT (RAPID TEST, EASY TOUCH)		 UPT Puskesmas Matesih	
	SOP	Nomor		: 440/05.C.SOP.119.01/2019
		Terbit ke		: 2
		No.Revisi		: 1
		Tgl.Terbit		: 2 Januari 2019
		Halaman	: 1 - 2	
Ditetapkan Kepala UPT Puskesmas Matesih		 drg. ENDANG SULASTRI NIP. 197910172010012013		

Pengertian	Asam urat adalah penyakit dari sisa metabolisme zat purin yang berasal dari sisa makanan yang kita konsumsi. Purin diolah tubuh menjadi asam urat, tetapi jika kadar asam urat berlebih, ginjal tidak mampu mengeluarkan sehingga kristal asam urat menumpuk di persendian. Akibatnya sendi terasa nyeri, bengkak dan meradang.
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk Pemeriksaan lab asam urat Petugas Laboratorium di Puskesmas Matesih
Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Matesih Nomor 449/1/70: 05/2019 tentang jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yang tersedia.
Referensi	KMK No. HK.02.02-MENKES-514-2015 ttg Panduan Praktik Klinis Dokter FASYANKES, hal 1242 <i>Manual Guide Uric Acid Easy Touch</i> . 2016. Taiwan
Langkah-langkah/ Prosedur	a. Lakukan cuci tangan lalu gunakan APD sebelum melakukan pemeriksaan. b. Siapkan alat Easy Touch dan masukkan <i>strip test uric acid</i> dan pastikan sesuai kode. c. Lakukan pengambil darah kapiler pasien dengan lancet steril dan hapus darah yang keluar pertama kali dengan kapas. d. Tunggu sampai tampak tanda tetes darah. e. Teteskan darah pada ujung strip test yang sudah disiapkan. f. Tunggu reaksi 20 detik dan baca hasilnya yang tertera pada alat.
Diagram Alir	-
Unit Terkait	Laboratorium, Ruang Pemeriksaan Umum, Ruang Kesehatan Ibu dan KB, dan Ruang UGD dan Rawat Inap.

Rekaman Historis:

No	Halaman	Yang dirubah	Perubahan	Diberlaku- kan Tgl.
1.	1	Ditetapkan Plt UPT Puskesmas Matesih	Kepala UPT Puskesmas Matesih	2 Januari 2019
2.	1	drg. Dwi Rusharyati NIP.197302142000122005	drg. Endang Sulastri NIP.197910172010012013	2 Januari 2019