

 Dinkes Kab Karanganyar	PEMERIKSAAN TINJA/ FAECES		 UPT Puskesmas Matesih	
	SOP	Nomor		: 440.05.C.SOP.112.01/2019
		Terbit ke		: 2
		No.Revisi		: 1
		Tgl.Terbit		: 2 Januari 2019
	Halaman	: 1 - 2		
Ditetapkan Kepala UPT Puskesmas Matesih		 drg. ENDANG SULASTRI NIP. 197910172010012013		

Pengertian	Tinja merupakan sisa – sisa hasil digesti dan absorpsi dari makanan yang dikeluarkan melalui anus dari saluran cerna. Dengan penambahan zat eosin atau lugol maka mikroorganisme dan unsur lain dalam faeces/ tinja akan tampak lebih jelas
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeriksaan faeces bagi Petugas Laboratorium di UPT. Puskesmas Matesih.
Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Matesih No. 449.1/70.05/2019 tentang Jenis-Jenis Pemeriksaan Laboratorium Yang Tersedia.
Referensi	Ganda soebrata, R. 2016. <i>Penuntun Laboratorium Klinik</i> . Cetakan XVI. PT. Dian Rakyat. Jakarta KMK No. HK.02.02-MENKES-514-2015 ttg Panduan Praktik Klinis Dokter FASYANKES, hal. 1221
Prosedur/ Langkah- langkah	a. Petugas menggunakan APD sebelum melakukan pemeriksaan b. Petugas memberikan tempat faeces yang bersih pada pasien dan memberi identitas pasien. c. Petugas meninformasikan untuk faeces yang diambil sedikit saja dan diduga ada kelainan misal lendir atau darah d. Tempat faeces dapat dibawa pulang, menyerahkan maksimal 2 jam setelah faeces dikeluarkan. e. Petugas menerima faeces dari pasien, kemudian memeriksanya. f. Petugas memeriksa makroskopis terlebih dahulu meliputi : Warna, bau, konsistensi, lendir, darah, nanah, parasit serta makanan yang tidak dicerna, kemudian baru mikroskopis g. Mikroskopis: Petugas menyiapkan object glass yang bersih dan bebas lemak dan deck glass. h. Petugas mengambil sedikit faeces, meletakkan pada object glass tersebut. i. Petugas memberi 1 tetes eosin 2 %, mengaduk dengan ujung deck glass dan segera menutup dengan deck glass.

	j. Petugas memeriksa di bawah mikroskop dengan lensa obyektif 10x, kemudian 40x. k. Petugas melihat adanya sisa makanan, bakteri, telur cacing, amoeba, cacing dewasa. Nilai Rujukan : Warna : kuning Konsistensi : biasa Darah : (-) negatif Lekosit : (-) negatif Eritrosit : (-) negatif Amoeba : (-) negatif Telur cacing : (-) negatif Lendir : (-) negatif Hal-hal yang perlu diperhatikan : Petugas harus segera melakukan pemeriksaan karena bakteri dapat berkembang biak
Diagram Alir	-
Unit terkait	Laboratorium, Ruang Pemeriksaan Umum, Ruang Kesehatan Ibu dan KB, Ruang Kesehatan Anak dan Imunisasi, dan Ruang UGD dan Rawat Inap.

Rekaman Historis:

No	Halaman	Yang dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.
1.	1	Ditetapkan Plt UPT Puskesmas Matesih	Kepala UPT Puskesmas Matesih	2 Januari 2019
2.	1	drg. Dwi Rusharyati NIP.197302142000122005	drg. Endang Sulastri NIP.197910172010012013	2 Januari 2019