

 Dinkes Kab Karanganyar	PEMERIKSAAN KOLESTEROL TOTAL (RAPID TEST, EASY TOUCH)		 UPT Puskesmas Matesih
	SOP	Nomor : 440/05.C. SOP.120.01/2019	
		Terbit ke : 2	
		No.Revisi : 1	
		Tgl.Terbit : 2 Januari 2019	
	Halaman : 1 - 2		
Ditetapkan Kepala UPT Puskesmas Matesih		 <u>drg. ENDANG SULASTRI</u> NIP. 197910172010012013	

Pengertian	Kolesterol adalah lemak yang terdapat dalam aliran darah atau sel tubuh yang sebenarnya dibutuhkan untuk pembentukan dinding sel dan sebagai bahan baku beberapa hormon.
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeriksaan kolesterol bagi petugas laboratorium di Puskesmas Matesih
Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Matesih No. 440/...../2019 tentang tentang jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yang tersedia.
Referensi	KMK No. HK.02.02-MENKES-514-2015 ttg Panduan Praktik Klinis Dokter FASYANKES, hal 1242 <i>Manual Guide Cholesterol Easy Touch. 2016</i>
Langkah-langkah/ Prosedur	a. Petugas melakukan cuci tangan lalu memakai APD sebelum melakukan tindakan. b. Petugas menyiapkan alat Easy Touch dan memasukkan strip test kolesterol dan pastikan sesuai kode. c. Petugas mengambil darah kapiler pasien dengan lancet steril dan menghapus darah yang keluar pertama kali dengan kapas. d. Petugas menunggu sampai tampak tanda tetes darah. e. Petugas meneteskan darah pada ujung strip test yang sudah disiapkan. f. Petugas menunggu reaksi 150 detik dan membaca hasilnya yang tertera pada alat.
Diagram Alir	-
Unit Terkait	Laboratorium, Ruang Pemeriksaan Umum, Ruang Kesehatan Ibu dan KB, Ruang Kesehatan Anak dan Imunisasi, dan Ruang UGD dan Rawat Inap.

Rekaman Historis:

No	Halaman	Yang dirubah	Perubahan	Diberlaku- kan Tgl.
1.	1	Ditetapkan Plt UPT Puskesmas Matesih	Kepala UPT Puskesmas Matesih	2 Januari 2019
2.	1	drg. Dwi Rusharyati NIP.197302142000122005	drg. Endang Sulastri NIP.197910172010012013	2 Januari 2019