
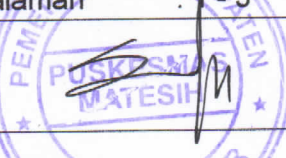



 Dinkes Kab Karanganyar	PEMERIKSAAN URIN LENGKAP 10 PARAMETER CARIK CELUP (PEMBACAAN DENGAN URYXON RELAX)		 UPT Puskesmas Matesih
	SOP	Nomor : 440/05-C-SOP/III.01/2019 Terbit ke : 2 No.Revisi : 1 Tgl.Terbit : 2 Januari 2019 Halaman : 1-3	
Ditetapkan Kepala UPT Puskesmas Matesih			drg. ENDANG SULASTRI NIP. 197910172010012013


Pengertian	Urinalisis adalah analisis fisik, kimia, dan mikroskopik terhadap urin. Urinalisis berguna untuk untuk mendiagnosis penyakit ginjal atau infeksi saluran kemih dan untuk mendeteksi adanya penyakit metabolik yang tidak berhubungan dengan ginjal.
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeriksaan urin lengkap dengan menggunakan strip urin 10 parameter.
Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Matesih No.449-1/10.05/2019 tentang Jenis Jenis Pemeriksaan Laboratorium yang tersedia.
Referensi	MRK Diagnostics. 2016. Standard Operating Procedures Uryxxon Relax. Medi-Test Uryxxon Stick 10. Laboratory Manual Series Volume IV. Macherey-Nagel, Jerman KMK No. HK.02.02-MENKES-514-2015 ttg Panduan Praktik Klinis Dokter FASYANKES, hal. 1227
Langkah-langkah/ Prosedur	1. <u>Operasional Rutin</u> - Lakukan cuci tangan lalu pakai APD sebelum melakukan tindakan. A. Menghidupkan Alat - Tekan tombol <i>on/off</i> pada <i>Stavol</i>. - Tekan tombol <i>on/off</i> pada <i>UPS</i>. - Tekan tombol <i>on/off</i> alat <i>Uryxxon Relax</i> yang terletak pada <i>body</i> bagian belakang alat. - Alat akan melakukan Self Test secara otomatis - Apabila muncul gambar seperti dibawah ini maka alat sudah siap untuk di gunakan

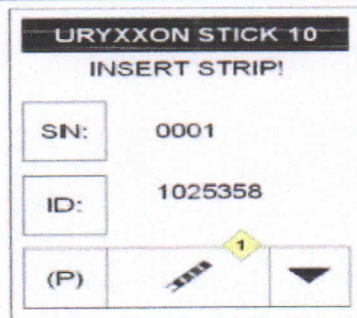

B. Pengukuran Sampel

1. Celupkan strip (Medi-Test URYXXON® Stick 10) ke dalam sampel urin selama sekitar satu detik
2. Sentuhkan ujung Strip pada kertas *tissue* untuk membuang urin yang berlebih
3. Tempatkan strip pada wadah strip yang terdapat pada alat.
4. Geserlah atau doronglah Strip sampai ujung wadah. Jangan menyentuh bantalan reagen pada Strip.
 - Instrumen akan mendeteksi secara otomatis strip yang ditempatkan pada wadah
 - Strip akan ditarik ke dalam instrumen setelah 30 detik
 - Setelah kira-kira 60 detik hasil pengukuran akan ditampilkan pada layar
 - Dengan memilih panel kembali atau no.3 pada gambar akan membuat layar kembali ke awal permulaan (*start*).
5. Lakukan prosedur diatas untuk pengukuran sample selanjutnya.

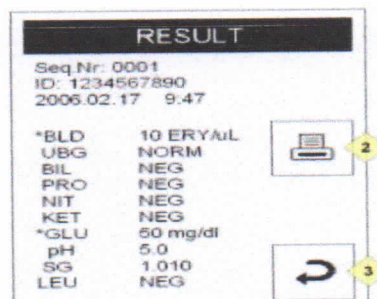

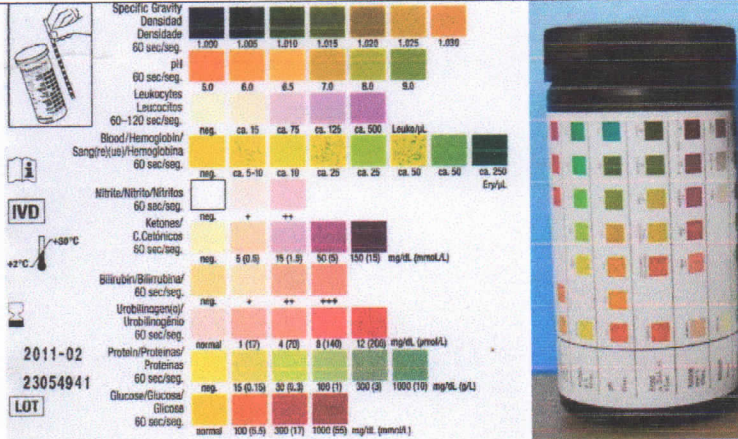	
Diagram Alir	-
Unit Terkait	Laboratorium, Ruang Pemeriksaan Umum, Ruang Kesehatan Ibu dan KB, Ruang Kesehatan Anak dan Imunisasi, dan Ruang UGD dan Rawat Inap.

Rekaman Historis:

No	Halaman	Yang dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.
1.	1	Ditetapkan Plt UPT Puskesmas Matesih	Kepala UPT Puskesmas Matesih	2 Januari 2019
2.	1	drg. Dwi Rusharyati NIP.197302142000122005	drg. Endang Sulastri NIP.197910172010012013	2 Januari 2019