

 Dinkes Kab Karanganyar	PEMERIKSAAN SEDIMEN URIN		 UPT Puskesmas Matesih
	SOP	Nomor : 440/05-C.SOP/116.01/2019	
		Terbit ke : 2	
		No.Revisi : 1	
		Tgl.Terbit : 2 Januari 2019	
Halaman : 1 - 2			
Ditetapkan Kepala UPT Puskesmas Matesih		 drg. ENDANG SULASTRI NIP. 197910172010012013	

Pengertian	Berat jenis unsur sedimen organic dan anorganik lebih besar dari pada berat jenis urin, sehingga dengan sentrifuse maka zat-zat tersebut akan mengendap.
Tujuan	Sebagai acuan bagi petugas laboratorium di UPT. Puskesmas Matesih dalam pemeriksaan sedimen urin.
Kebijakan	SK Kepala Puskesmas Matesih No. 443.1/70.05/2019 tentang jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yang tersedia.
Referensi	Ganda soebrata, R. 2016. <i>Penuntun Laboratorium Klinik</i> . Cetakan XVI. PT. Dian Rakyat. Jakarta KMK No. HK.02.02-MENKES-514-2015 ttg Panduan Praktik Klinis Dokter FASYANKES, hal. 1228
Prosedur/Langkah- Langkah	- Petugas melakukan cuci tangan lalu memakai APD sebelum melakukan tindakan. - Petugas memberikan tempat urin yang bersih kepada pasien. - Petugas menganjurkan segera kencing dan ditampung pada tempat urin. - Petugas menerima urin dari pasien. - Petugas menuangkan urin ke dalam tabung centrifuse kira-kira setengah tabung. - Petugas memasukkan tabung kedalam sentrifuse urine $\pm$ 5-10 menit. - Petugas membuang cairan atas sehingga tinggal endapan yang tersisa $\pm$ 0,5 ml. - Petugas meneteskan 1 tetes sedimen ke object tutup deck glass. - Petugas memeriksa dengan mikroskop dengan pembesaran 10x kemudian 40x. - Petugas melakukan pembacaan hasil. Jumlah rata-rata lekosit dan eritrosit dilaporkan dalam LPB,

	sedangkan epitel, silinder kristal dan unsur lain dilaporkan dalam LPK. • (+) bila jumlah sedikit • (++) jika jumlah banyak • (+++) jika jumlah banyak sekali
Diagram Alir	-
Unit terkait	Laboratorium, Ruang Pemeriksaan Umum, Ruang Kesehatan Ibu dan KB, Ruang Kesehatan Anak dan Imunisasi, dan Ruang UGD dan Rawat Inap.

Rekaman Historis:

No	Halaman	Yang dirubah	Perubahan	Diberlaku- kan Tgl.
1.	1	Ditetapkan Plt UPT Puskesmas Matesih	Kepala UPT Puskesmas Matesih	2 Januari 2019
2.	1	drg. Dwi Rusharyati NIP.197302142000122005	drg. Endang Sulastr NIP.197910172010012013	2 Januari 2019